



G-PEP

Studie

TWO nummer:	2021-156
Contactpersonen +telnr.	Lab: Stan van Nijkerken, dect 3239 MDL: dr Hadithi, dect 2282 Onderzoeker: Mike de Jong, 088-3207054
Vakgroep	MDL

Ponsplaatje

STUDIE NUMMER	AFNAME DATUM	AFNAME TIJD	VISIT
			<input type="checkbox"/> pre ERCP <input type="checkbox"/> 2 uur na ERCP

INSTRUCTIE AFNAME:

Vul dit formulier in: studienummer, afname datum en tijd + welke afname het is

Neem de EDTA buis (paars) af die in het afnamekitje zit

Breng het zakje inclusief de EDTA buis, afschenkbusjes en deze brief naar het laboratorium (3G5-078)

INSTRUCTIE LABORATORIUM:

Centrifugeer de EDTA buis 10 minuten bij 2300g.

Pipetteer 1,5ml plasma in elk van 2 cryotubes die in het zakje zitten.

Meng het overgebleven plasma met de cellen en pipetteer daaruit 1,5ml in elk van de 2 overige cryotubes.

Plaats de 4 cryotubes in een speciaal doosje in de -80°C vriezer

Dit formulier in de Trial-map TR-275-C-PEP voegen.